

# Multi-Ligator PLUS

H1002




# Multi-Ligator PLUS

Med denna Multi-Ligator för engångsbruk blir det enklare att utföra gummiligeringar av hemorrojder. Multi-Ligatorn PLUS är laddad med fyra latexfria gummiband vilket underlättar mycket då inga nya band behöver monteras. Håll in avtryckaren halvvägs för att aktivera suget och tryck sedan hela vägen in för att applicera bandet, släpp avtryckaren för att frigöra suget och hemorrojden. Denna nya uppdaterade Multi-Ligator PLUS har lite starkare gummiband, ett transparent huvud framtill för bättre sikt samt ett handtag med frostad yta för att veta när suget börjar.

- Enkel användning, kan manövreras av en person
  - Snabb, en behandling kan ta mindre än 5 minuter
  - Klar att användas, behöver inte laddas om med nya gummiband
  - Minskad smärta för patienten
  - Nytt transparent huvud framtill
  - Bättre sikt
  - Lite kraftigare gummiband
  - Bättre precision, utformningen underlättar en korrekt applicering
  - Kostnadseffektiv
- Engångs
  - Ej autoklaverbar
  - Latexfri

Material: Polyamid, PVC, ABS, POM

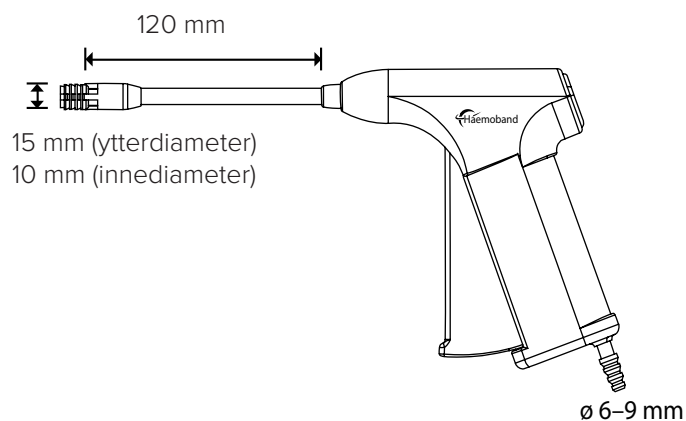

ARTIKEL NR.	PRODUKT	AVD. FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING	TRANSP.FÖRPACKNING
H1002	120 g	10 st	60 st	7,5 kg

