



# CETRO® Prolapse Ring

PER00 - PER09



# CETRO® Prolapse Ring

Den flexibla silikonringen används ofta vid ett mildt första- eller andra gradens livmoderframfall eller total prolaps. Donut-prolapsring används vid ett tredje gradens livmoderframfall samt vid cystocele och rectocele och används ofta av postmenopausala kvinnor.

- Prolapsringarna är tillverkade av 100 % medicinsk silikon.
- De är avsedda för engångsbruk per patient.
- Utrustning av rätt storlek kräver vanligtvis en testning av olika storlekar för att fastställa rätt prolapsringsstorlek.
- För att underlätta införandet av prolapsring kan en vaginalt applicerad glidkräm behövas för patientens komfort.
- Läkaren kan föreslå K-Y jelly® eller en motsvarande produkt.


Läkaren bör avgöra om patienten behöver östrogenbehandling innan en prolapsring ordineras. Inom 24 till 48 timmar bör det säkerställas att patienten inte är allergisk mot prolapsringen. Undersök slidan och fråga patienten om eventuellt obehag, irritation, tryck, känslighet eller ovanliga flytningar. Utvärdera också om det har skett någon förbättring av patientens symtom.

Guangzhou Fame Medical Co., Ltd. är ett företag som specialiserar sig på forskning och utveckling, produktion och försäljning av medicinska silikonprodukter. Fame Medical grundades 2007 och har i över tio år varit engagerat i forskning, utveckling och produktion av medicinska silikonprodukter, med en djup förståelse för silikonprodukter och deras tekniska processer. Fame Medical kan erbjuda omfattande utbildning i produktionsprocesser och produktbearbetning, inklusive produktutveckling, formdesign och medicinska silikonkomponenter.

## Material Silikon



PER00	CETRO® Prolapse Ring 43mm (9613-0)
PER01	CETRO® Prolapse Ring 51mm (9613-1)
PER02	CETRO® Prolapse Ring 55mm (9613-2)
PER03	CETRO® Prolapse Ring 62mm (9613-3)
PER04	CETRO® Prolapse Ring 67mm (9613-4)
PER05	CETRO® Prolapse Ring 74mm (9613-5)
PER06	CETRO® Prolapse Ring 80mm (9613-6)
PER07	CETRO® Prolapse Ring 87mm (9613-7)
PER08	CETRO® Prolapse Ring 95mm (9613-8)
PER09	CETRO® Prolapse Ring 99mm (9613-9)

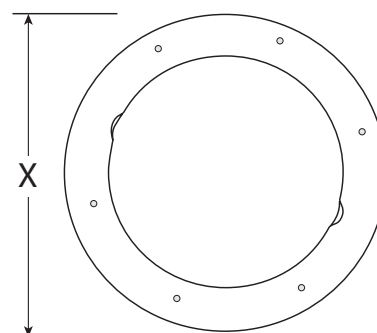

ARTIKEL NR.	AVD. FÖRPACKNING
PER00 - PER09	1 st