


CETRO® Prolapse Incontinence

PERK00 - PERK07

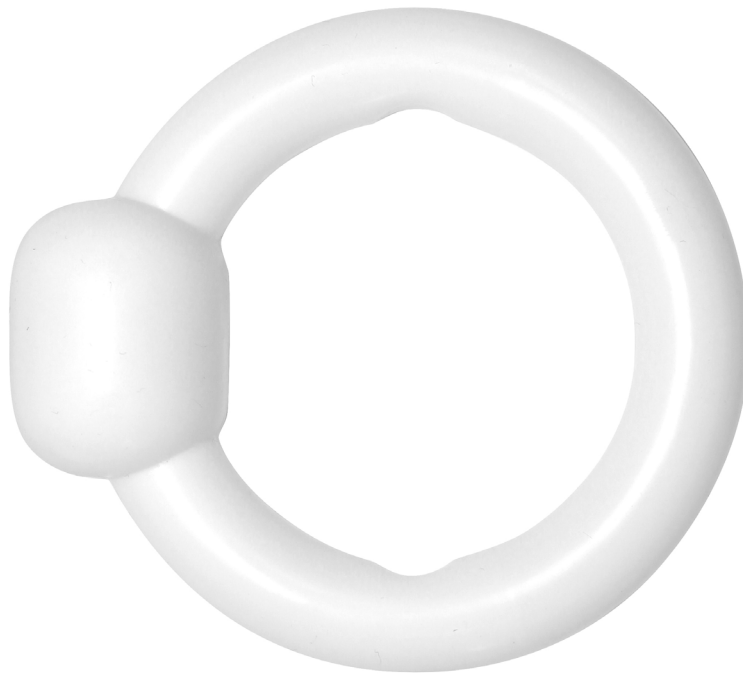

CETRO® Prolapse Inkontinence

Den flexibla silikonringen används ofta vid ett mildt första- eller andra gradens livmoderframfall eller total prolaps. Donut-prolapsring används vid ett tredje gradens livmoderframfall samt vid cystocele och rectocele och används ofta av postmenopausala kvinnor.

- Prolapsringarna är tillverkade av 100 % medicinsk silikon.
- De är avsedda för engångsbruk per patient.
- Utrustning av rätt storlek kräver vanligtvis en testning av olika storlekar för att fastställa rätt prolapsringsstorlek.
- För att underlätta införandet av prolapsring kan en vaginalt applicerad glidkräm behövas för patientens komfort.
- Läkaren kan föreslå K-Y jelly® eller en motsvarande produkt.


Läkaren bör avgöra om patienten behöver östrogenbehandling innan en prolapsring ordineras. Inom 24 till 48 timmar bör det säkerställas att patienten inte är allergisk mot prolapsringen. Undersök slidan och fråga patienten om eventuellt obehag, irritation, tryck, känslighet eller ovanliga flytningar. Utvärdera också om det har skett någon förbättring av patientens symtom.

Guangzhou Fame Medical Co., Ltd. är ett företag som specialiserar sig på forskning och utveckling, produktion och försäljning av medicinska silikonprodukter. Fame Medical grundades 2007 och har i över tio år varit engagerat i forskning, utveckling och produktion av medicinska silikonprodukter, med en djup förståelse för silikonprodukter och deras tekniska processer. Fame Medical kan erbjuda omfattande utbildning i produktionsprocesser och produktbearbetning, inklusive produktutveckling, formdesign och medicinska silikonkomponenter.

Material Silikon



PERK00	CETRO® Prolapse Inkontinence 43mm (9616-0)
PERK01	CETRO® Prolapse Inkontinence 49mm (9616-1)
PERK02	CETRO® Prolapse Inkontinence 56mm (9616-2)
PERK03	CETRO® Prolapse Inkontinence 62mm (9616-3)
PERK04	CETRO® Prolapse Inkontinence 68mm (9616-4)
PERK05	CETRO® Prolapse Inkontinence 74mm (9616-5)
PERK06	CETRO® Prolapse Inkontinence 81mm (9616-6)
PERK07	CETRO® Prolapse Inkontinence 87mm (9616-7)

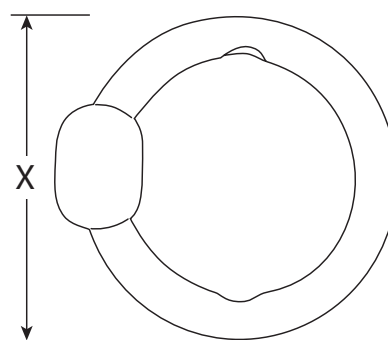

ARTIKEL NR.

AVD. FÖRPACKNING

PERK00-PERK07

1 st